



Centro di Riferenza Nazionale per la tubercolosi da *M.Bovis*

Modalità di prelievo e consegna dei campioni di sangue per il test del gamma-interferon per la diagnosi di Tubercolosi Bovina

1. I prelievi possono essere effettuati su tutti i capi dell'azienda di età superiore ai **sei** mesi.
2. Prelevare da ogni animale il campione di sangue dalla vena giugulare utilizzando una provetta tipo "**vacutainer**" **contenente Litio o Sodio Eparina**. Il volume deve essere di **almeno 5 ml per provetta**. Prima di riporre la provetta, invertirla delicatamente più volte in modo che l'anticoagulante si distribuisca in tutto il campione di sangue.
3. I campioni devono essere consegnati, previa prenotazione telefonica (tel. 030.2290365), direttamente al Laboratorio Benessere Animale, Biochimica Clinica e Immunologia Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia entro 8 ore dal prelievo e non più tardi delle ore 14.00, da lunedì al giovedì.
4. Durante il trasporto I campioni devono essere tenuti a temperatura ambiente (**20-25°C**), **evitando di esporli a temperature estreme**.